

## Quick Wipes

### Desinfektionstücher

- bakterizid · levurozid
- aldehyd- und phenolfrei · alkoholfrei
- VAH-gelistet

#### Charakteristika

Gebrauchsfertige, getränkte Wischtücher zur Schnelldesinfektion, 25 x 25 cm Tuchgröße, einzeln entnehmbar und schnell einsatzbereit, besonders materialschonend, zur Desinfektion von Ultraschallköpfen ohne Schleimhautkontakt geeignet.

#### Anwendungsbereiche / Handhabung

**Gem. EU-Medizinprodukteverordnung:** Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten.

**Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR):** Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen Flächen.

Schneiden Sie den Beutel Quick Wipes Desinfektionstücher an der Schnittkante auf und setzen den Beutel mit der Rolle in den Spender ein. Ziehen Sie das erste Tuch Quick Wipes Desinfektionstücher aus der Mitte der Rolle und führen Sie den vorderen Teil des Tuches durch den Entnahmestern im Deckel des Spenders. Schließen Sie den Schutzdeckel und achten Sie dabei darauf, dass das Tuch komplett umschlossen ist.

Schließen Sie den Schutzdeckel nach jeder Tuchentnahme wieder sorgfältig, um nachfolgende Tücher vor Austrocknen zu schützen. Flächen und Gegenstände vollständig benetzen. Einwirkzeit einhalten.

Berücksichtigen Sie auch die KRINKO-Empfehlung zu „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen.“

#### Zusammensetzung

In 100 g Tränkflüssigkeit INTERMED Desinfektionslösung sind als wirksame Bestandteile enthalten:

- Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,5 g
- Didecyldimethylammoniumchlorid 0,25 g.

#### Mikrobiologische Wirksamkeit

- bakterizid
- levurozid
- begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV/HCV/HIV/BVDV, Vaccinia-Viren)
- Papova-/Polyoma-, Rota-Viren inaktivierend

#### Listung und Zulassung

baua: Reg.-Nr.: N-55049  
VAH-gelistet

#### Besondere Hinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**Bei Kontakt mit den Augen:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung.

#### Lieferformen

Rolle à 70 Tücher  
3 Rollen à 70 Tücher

Best.-Nr.: 211180  
Best.-Nr.: 211181



CE 0482

## Quick Wipes

### Desinfektionstücher

- bakterizid · levurozid
- aldehyd- und phenolfrei · alkoholfrei
- VAH-gelistet

### Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

			30 s	1 min	2 min
<b>Bakterien und Hefen</b>					
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (bakterizid, levurozid)*	VAH**/ EN 16615	mit Mechanik, hohe und geringe Belastung		■	
<b>Behüllte Viren</b>					
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	■		
	EN 14476	niedrige Belastung	■		
<b>Unbehüllte Viren</b>					
wirksam gegen Papova-/ S40-Viren	EN 14476	hohe Belastung			■
wirksam gegen Rotaviren	RKI/DVV		■		
<b>Ergänzende Prüfergebnisse</b>					
bakterizid	EN 1040			■	
	EN 13727	hohe Belastung		■	
levurozid (C. albicans)	EN 1275			■	
	EN 13624	hohe Belastung		■	

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

\*\* gelistet in der 5 Minuten-Spalte der VAH-Liste